



## MICRO® 10+



Экономичный безальдегидный концентрат для предстерилизационной дезинфекции и очистки всех стоматологических и хирургических инструментов, в т.ч. боров, файлов, щипцов, зондов, зеркал и т.д. MICRO® 10+ обладает широким спектром активности и может использоваться как в контейнере для замачивания, так и в ультразвуковой ванночке.

### Основные характеристики продукта:


- экономичный 2%-ный раствор
- подходит для всех типов инструментов
- содержит ингибиторы коррозии для защиты инструментов от ржавчины
- соответствует требованиям международной директивы CE и может использоваться с медицинскими приборами (директива 93/42/ЕЕС – класс IIa)
- одобрен немецким обществом гигиены и микробиологии

### Состав продукта:

В 100 г MICRO® 10+ содержится 18 г 50%-ного алкилбензилдиметиламмония хлорида, чистящие щелочные соединения, неионные поверхностно-активные вещества, комплексанты, ингибиторы коррозии и присадки.

### Эффективен против:

- бактерий
- микобактерий туберкулёза (Tb)
- кандид
- аспергилл
- ВИЧ
- вируса гепатита В
- вируса гепатита С
- вируса герпеса

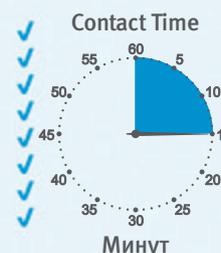

### Варианты поставки и аксессуары:

Бутылочка 150 мл  
 Канистра 1 л  
 Канистра 2,5 л  
 Канистра 5 л  
 Контейнер для замачивания ёмкостью 3 л (28 x 18 x 13 см)  
 Контейнер для замачивания боров (диаметр 73 мм, высота 52 мм)  
 Мензурка



### ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

ЮНИДЕНТ: +7 (495) 434-4601, fax +7 (495) 434-1020  
 ЮНИДЕНТ-Поволжье: +7 (846) 979-8600, fax +7 (846) 979-8601  
[www.unident.net](http://www.unident.net) e-mail: [unident@unident.net](mailto:unident@unident.net)



UNIDENT



## MICRO® 10+

### ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием:  
Наденьте защитные перчатки

#### Показания к применению:

MICRO® 10+ — концентрат для дезинфекции и очистки всех видов стоматологических и хирургических инструментов.

- 2% (20 мл на 1 л воды) для всех видов стоматологических инструментов.
- 5% (50 мл на 1 л воды) для использования в ультразвуковой ванночке в течение 3-8 минут. Выдерживает нагрев до 50°C.
- 10% (10 мл на 100 мл воды) для мелкого инструментария, например, файлов, алмазных боров и т.д.

#### Меры предосторожности:

Меняйте раствор 2-3 раза в неделю, минимум 1 раз в неделю. Меры предосторожности указаны в паспорте безопасности и на этикетке продукта. Препарат классифицирован как опасный, в соответствии с требованиями Европейской Директивы 99/45/ЕЕС.

#### Соответствует европейским стандартам:

Бактерицидные свойства: EN1040, EN13727, EN14561  
Фунгицидные свойства: EN1275, EN13624, EN14562

#### Физические свойства:

Цвет	Бледно-жёлтый
Запах	Без запаха
pH	7,5 (при разведении 2%)
Хранение	При температуре от +5°C до +35°C
Срок годности	Концентрат 3 года
	Неиспользованный раствор 28 дней
	Использованный раствор 7 дней в зависимости от загрязнения
Контейнер	Изготовлен из пластика, пригодного для переработки



Подготовьте в контейнере для замачивания 2%-ный раствор MICRO 10+ (20 мл на 1 л воды).



Погрузите инструменты в раствор и оставьте на 15 минут.



Аккуратно выньте инструменты из раствора и тщательно проверьте на наличие загрязнений, при необходимости снимите их.



Промойте инструменты под проточной водой или замочите в чистой воде.



Просушите инструменты чистым одноразовым бумажным полотенцем. Запакуйте инструменты и подготовьте для стерилизации.



CE1253



#### ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

ЮНИДЕНТ: +7 (495) 434-4601, fax +7 (495) 434-1020  
ЮНИДЕНТ-Поволжье: +7 (846) 979-8600, fax +7 (846) 979-8601  
www.unident.net e-mail: unident@unident.net



UNIDENT